



ラコール半固形剤専用アダプタについて

ラコールNF配合経腸用半固形剤（以下ラコール半固形剤）の投与方法は、これまではカテーテルチップで注入していたため作業が煩雑でしたが、ラコール半固形剤専用アダプタを使用すると、胃瘻チューブに直接接続できるため、より簡便に投与が可能となります。この専用アダプタについてはSPDで請求ができます。

使用方法



使用前にラコール半固形剤を
両手で交互に10回程度もむ

アダプタ刺入部に触れない
よう注意しながら開封する

刺入部を出す



胃瘻チューブの奥までアダプタを
差し込む→**取付完了**



しっかりねじ込む



ラコール半固形剤の口栓
にアダプタを差し込む

(ラコールNF配合経腸用半固形剤専用アダプタパンフレットより)

退院後に使用する場合には、調剤薬局等での購入が可能です。かかりつけの調剤薬局にて取り扱い可能かどうかについては事前に確認が必要です。ご不明な点があればNST委員までご相談ください。

看護師 森田しおり

お知らせ

第15回 岐阜南NST研究会

7月23日(木) 18:30~20:00 南館1階講堂

第3回 院内NST研修会

8月5日(水) 17:30~18:30 南館1階講堂